

# Le contrôle du respirateur


Pour effectuer ce test se positionner à côté de prises d'arrivée d'air et d'oxygène et munissez-vous du ballon testeur.

Un élément essentiel : **la molette** pour se déplacer sur l'écran et valider.




## 1.- Vérifier que l'appareil est en veille :

Existence du bandeau noir « en veille » en haut à gauche de l'écran

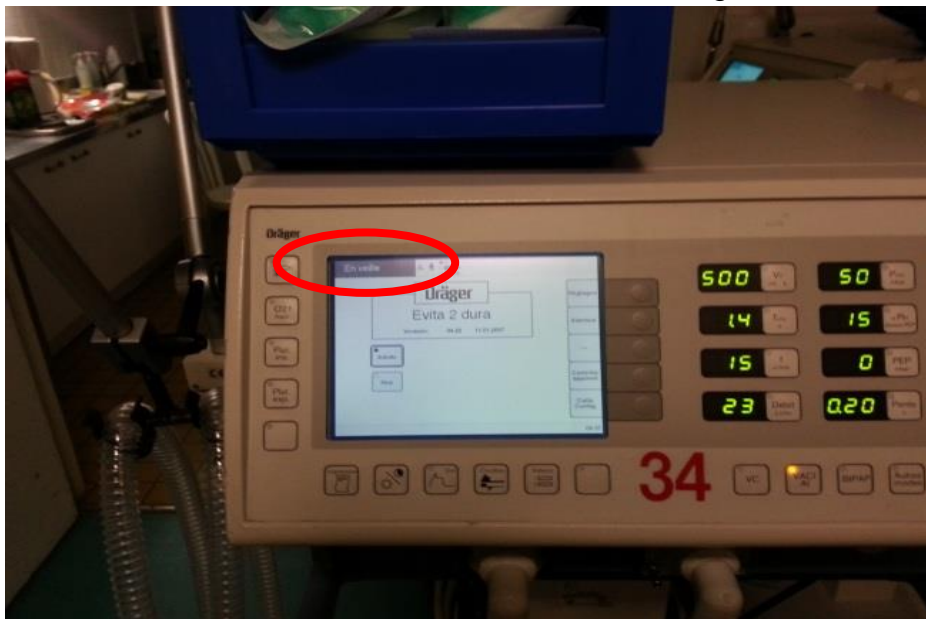

## 2.- Appuyer sur le bouton en face de la touche « contrôle appareil »

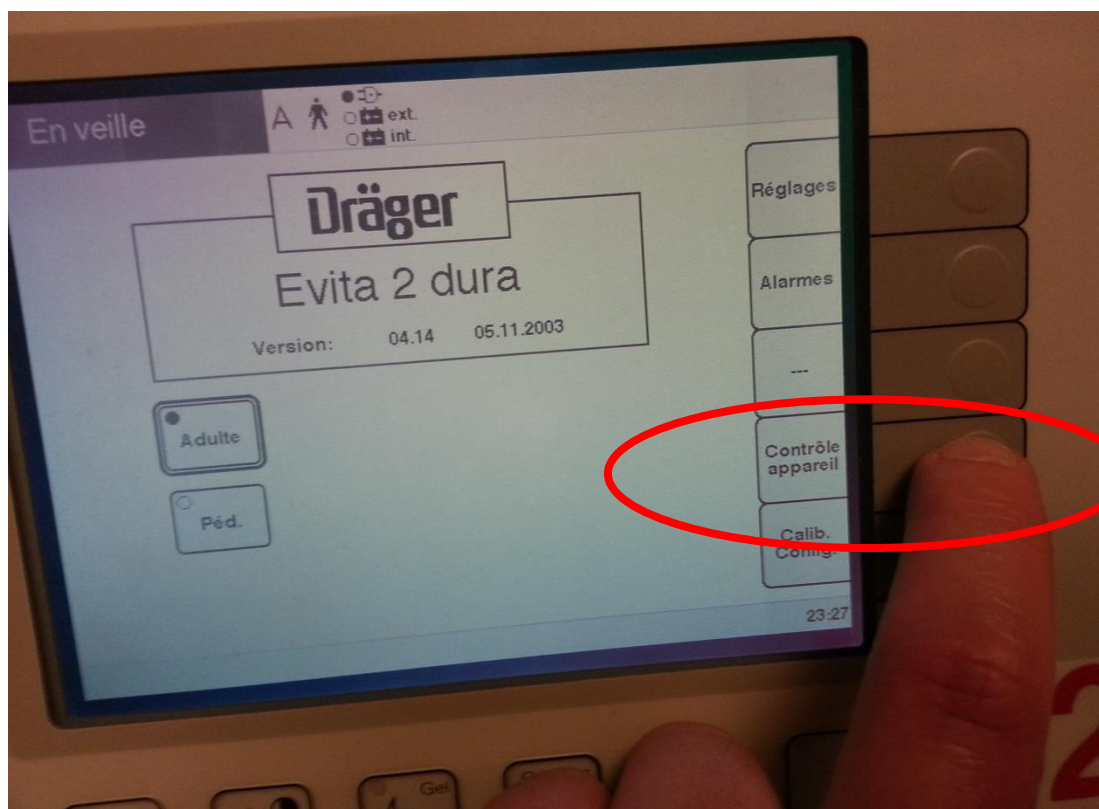


## 3.- Pour débiter les opérations de contrôle valider la touche « début contrôle » :


En vous servant de la molette à droite du respiratoire se positionné sur la touche « début contrôle »

Cette touche apparait alors encadrée sur l'écran du respirateur (Photo 1).

Valider en appuyant sur la molette, l'encart devient noir (photo 2) puis grise avec un cercle noir dans le quart supérieur gauche (photo 3)

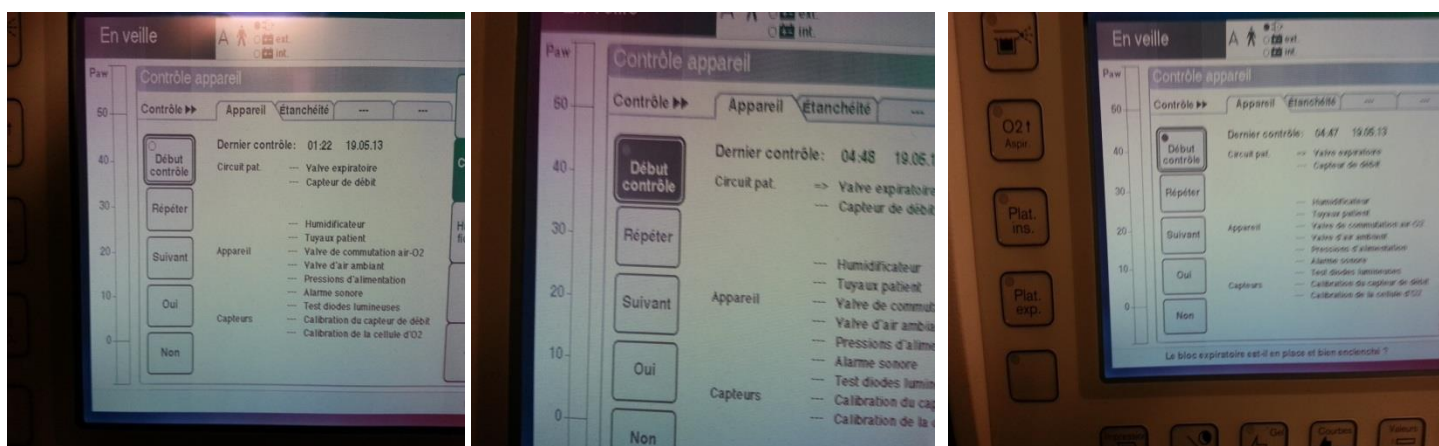


4.- Pour effectuer le contrôle suivre les consignes qui s'affichent en bas de l'écran :

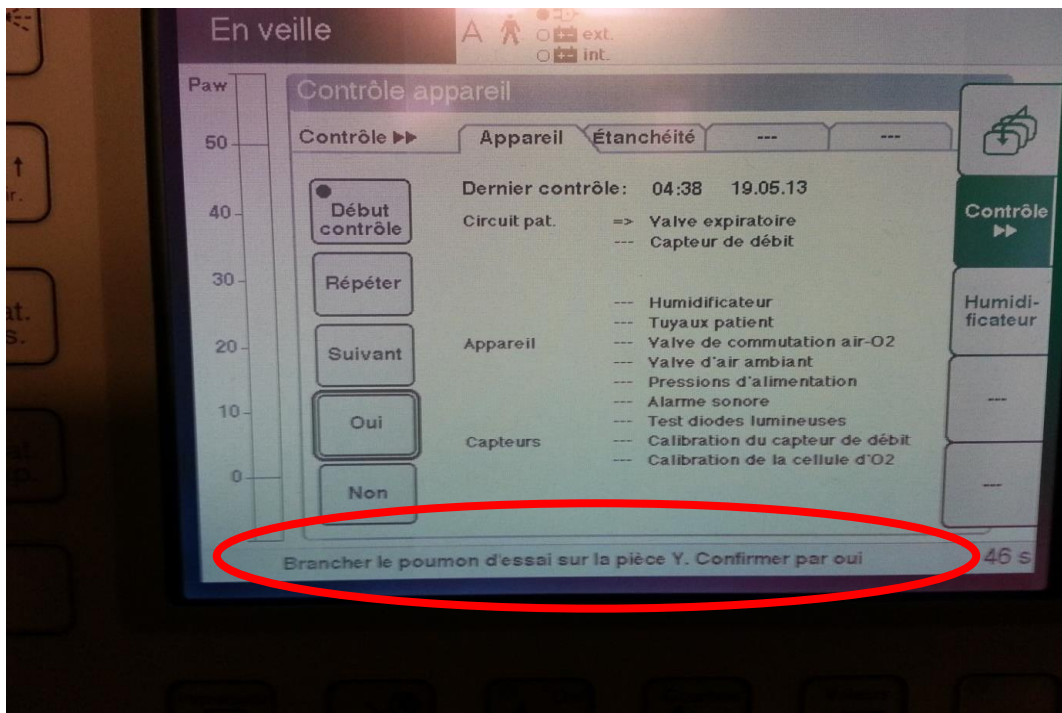


Répondez par oui par non en vous servant de la molette pour se positionner sur la case correspondant à votre réponse.

Validez en appuyant sur la molette à chaque question.

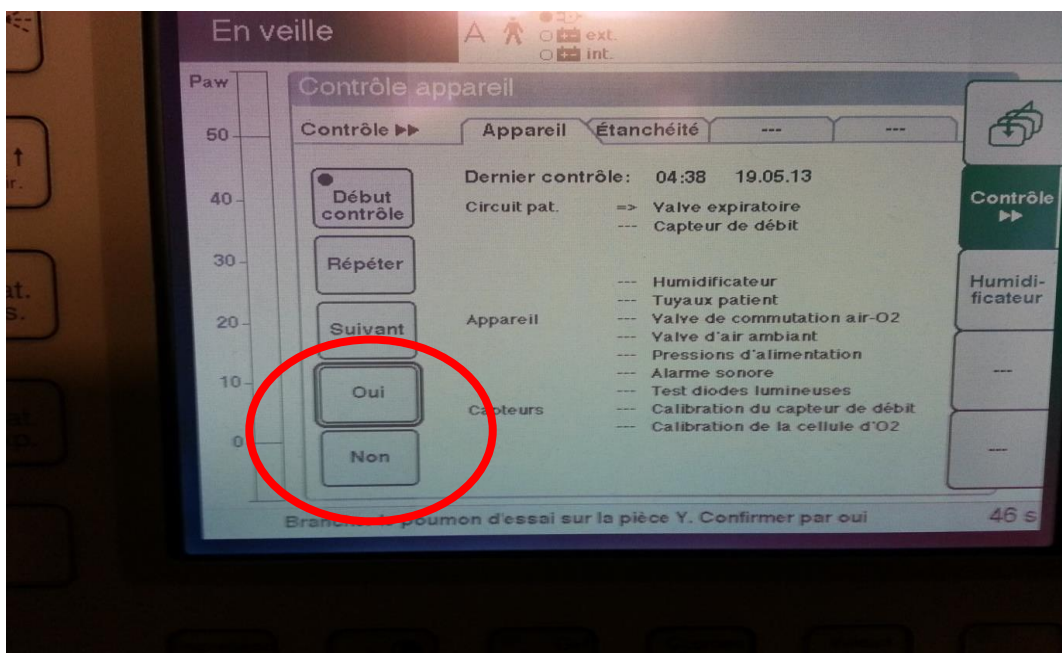


En cas d'échec il est possible de recommencer en sélectionnant la touche « répéter » à l'aide de la molette, ne pas oublier de valider.....

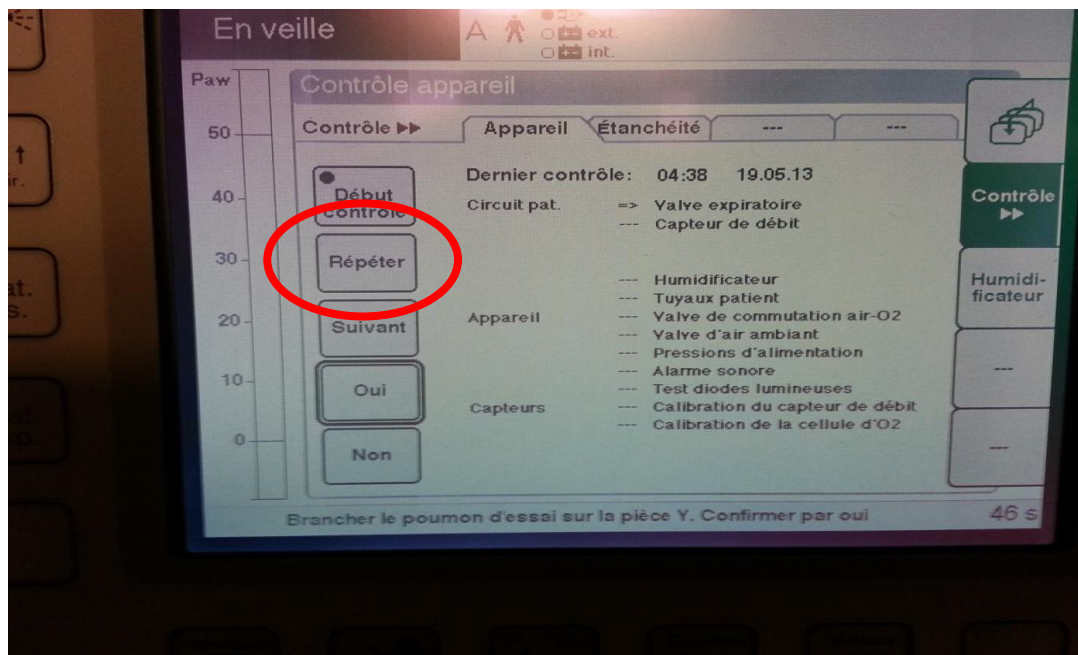

# Le test d'étanchéité


Pour y accéder appuyer sur le bouton en face de l'encart « contrôle »

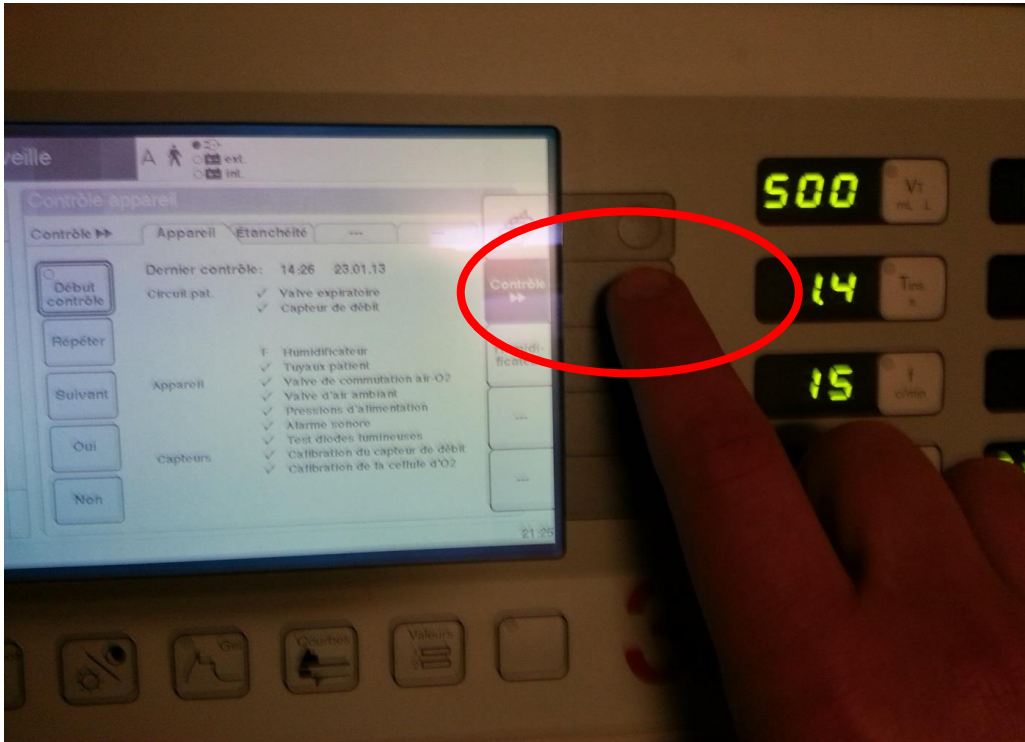


**Pour débiter les opérations de contrôle valider la touche « début contrôle » :**

En se servant de la molette à droite du respiratoire se positionner sur la touche « début contrôle »  
Cette touche apparait alors encadrée sur l'écran du respirateur (Photo 1).

Valider en appuyant sur la molette, l'encart devient noir (photo 2) puis grise avec un cercle noir dans le quart supérieur gauche (photo 3)

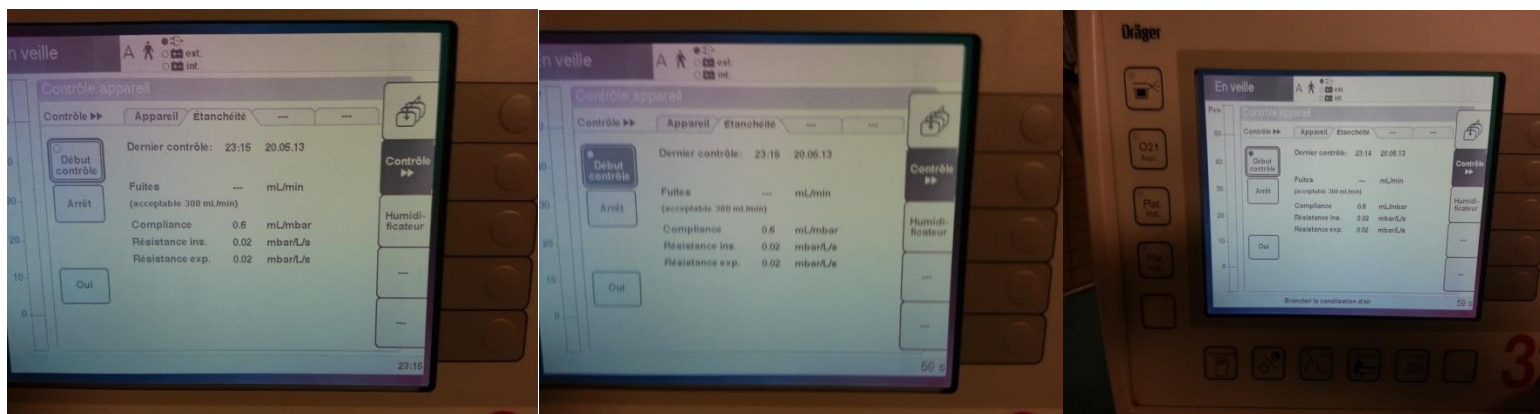

Pour effectuer le contrôle suivre les consignes apparaissant en bas de l'écran

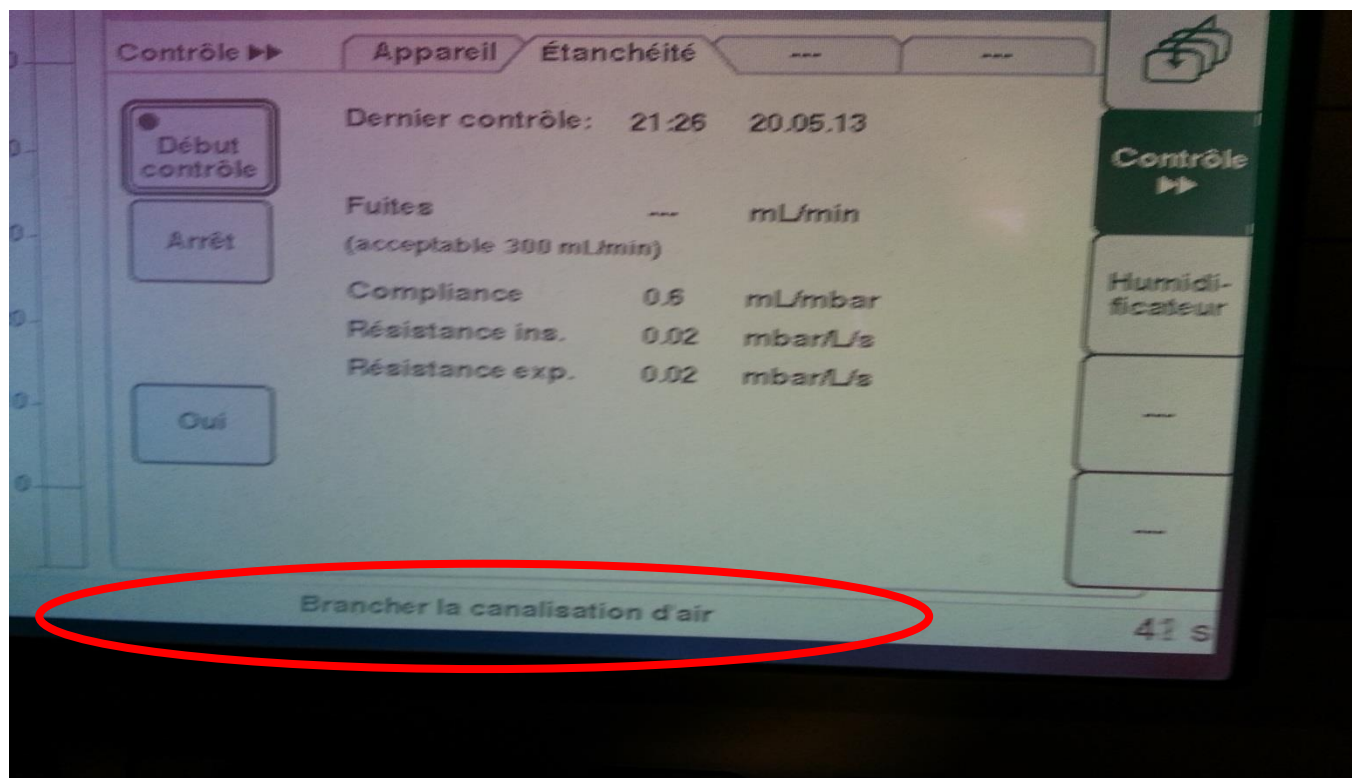

A chaque étape valider la réalisation de la consigne demandée par l'intermédiaire de la touche « oui » en vous servant de la molette.

