

Chambre transparente munie de 2 valves bleues :

- joue le rôle de réservoir,
- améliore la prise médicamenteuse en augmentant l'efficacité.



Le dispositif n'accepte que les aérosols doseurs issus du laboratoire fabriquant le BABYHALER.

- S'adresse aux enfants de moins de 6 ans.

INTERETS DU DISPOSITIF

Les valves bleues servent à contrôler les mouvements respiratoires et l'inhalation du médicament.

Le masque étanche, englobe le nez et la bouche.

- s'adapte parfaitement au visage du nourrisson ou du petit enfant.
- prévient les fuites de produit.

MODALITES D'UTILISATION

Positionner l'enfant assis, demi assis ou couché, l'essentiel est de maintenir le Babyhaler en position horizontale (meilleure fiabilité du système).

La chambre d'inhalation s'interpose entre l'aérosol doseur et la bouche du patient.

1. Retirer l'embout de protection de l'aérosol doseur,
2. Agiter l'aérosol doseur,
3. Introduire l'aérosol dans le Babyhaler,
4. Positionner le masque sur le nez et la bouche de l'enfant,
5. Appuyer avec le pouce 1 fois sur l'aérosol doseur pour libérer une dose de médicament,
6. Compter 10 mouvements de valve qui correspondent à 10 respirations par la bouche.
Si 2 bouffées sont prescrites pour le même médicament, répéter toute l'opération une deuxième fois.

Toujours administrer le bronchodilatateur avant le corticoïde. Attendre 10 minutes entre les deux. Rincer la bouche après le corticoïdes.

NETTOYAGE DE LA CHAMBRE D'INHALATION

- Démontez tous les éléments du Babyhaler y compris les valves.
- Au domicile : entretien facile et rapide. Laver avec du liquide vaisselle ou savon doux, rincer et sécher à l'air ambiant une fois par semaine.
A l'hôpital : utiliser L'ANIOSURF PREMIUM® selon les modalités habituelles.
- Remplacer les valves quand elles deviennent moins souples, moins mobiles, donc moins fiables lors de l'inhalation.